


I

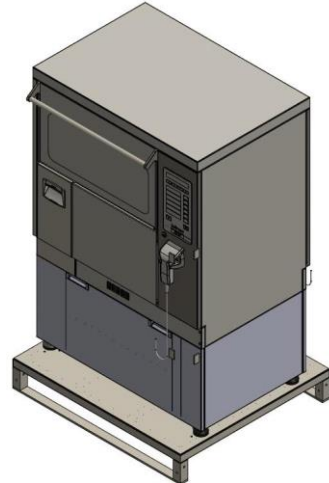


- Kontrollieren Sie, dass sich der Endowagen Etage 1 mit dem Desinfektionsblech und dem Blinddeckel in der Waschkammer befindet.
- Kontrollieren Sie, dass sich der Endowagen Etage 2 in der Waschkammer befindet.
- Kontrollieren Sie, dass die Waschkammertür geschlossen ist.

II



- Entfernen Sie mit Hilfe der Schnellverschlüsse die Gerätetür im Unterschrank.
- Bringen Sie das Gerät mit Hilfe des Hubwagens an die Öffnung des Containers.
- Heben Sie das Gerät mit dem Hydraulikstapler an.
- Platzieren Sie das Gerät entsprechend der reinen und unreinen Seite mittig auf den Transportsockel (Art. Nr. 609805).

III

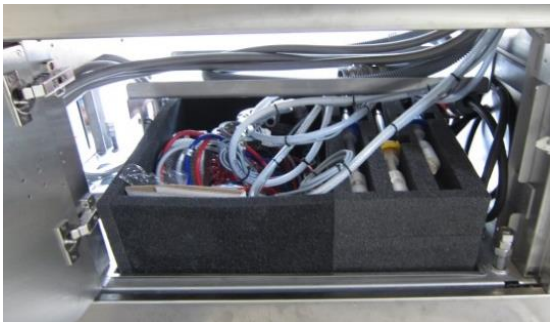

- Packen Sie alle Adaptersets, den Kleinteilekorb, die Adapterverschluss-Sets Olympus, die Kanaltrenner Olympus und den Halter für den Barcode Scanner in die Aussparung des Schaumstoff Einsatzes S1A.
- Platzieren Sie den teilweise gepackten Schaumstoff Einsatz S1A in den Unterschrank des Geräts.
- Legen Sie die Sauglanzen in die dafür vorgesehenen Rillen des Schaumstoffs.
- Legen Sie den Prozessvalidierungsbericht (Art. Nr. 609885), die Betriebsanleitung (Art. Nr. 609852), die Inhaltsliste und die Packanleitung in die Aussparung des Schaumstoff Einsatzes S1A.

IV



- Legen Sie den Endoskophalter (Art. Nr. 609992) auf den Schaumstoff Einsatz S1A.
- Legen Sie die Verteilerleiste VE-RDG-E (Art. Nr. 609938) in den Unterschrank.
- Sichern Sie die Wasserleitungen mit einem Kabelbinder.
- Legen Sie den Abwasserschlauch ordentlich zusammen.
- Legen Sie das Datenkabel ordentlich zusammen und sichern Sie es mit einem Kabelbinder.
- Legen Sie das Netzkabel zusammen in den Unterschrank.



V



An einem Vorderrahmen werden zwei, an dem anderen ein Dichtprofil befestigt.

- Befestigen Sie die 3 Dichtprofile Belimed (Art. Nr. 609990) mit den vormontierten Klettbanden an den beiden Vorderteilen (Art. Nr. 610039).

VI

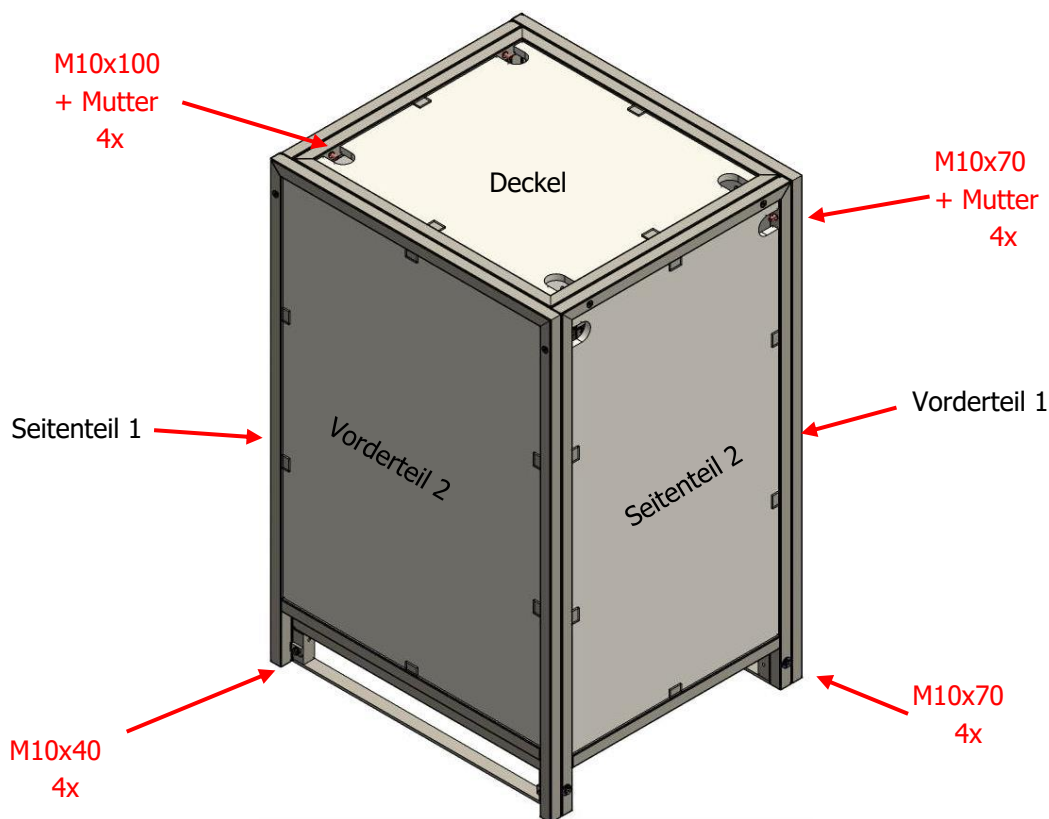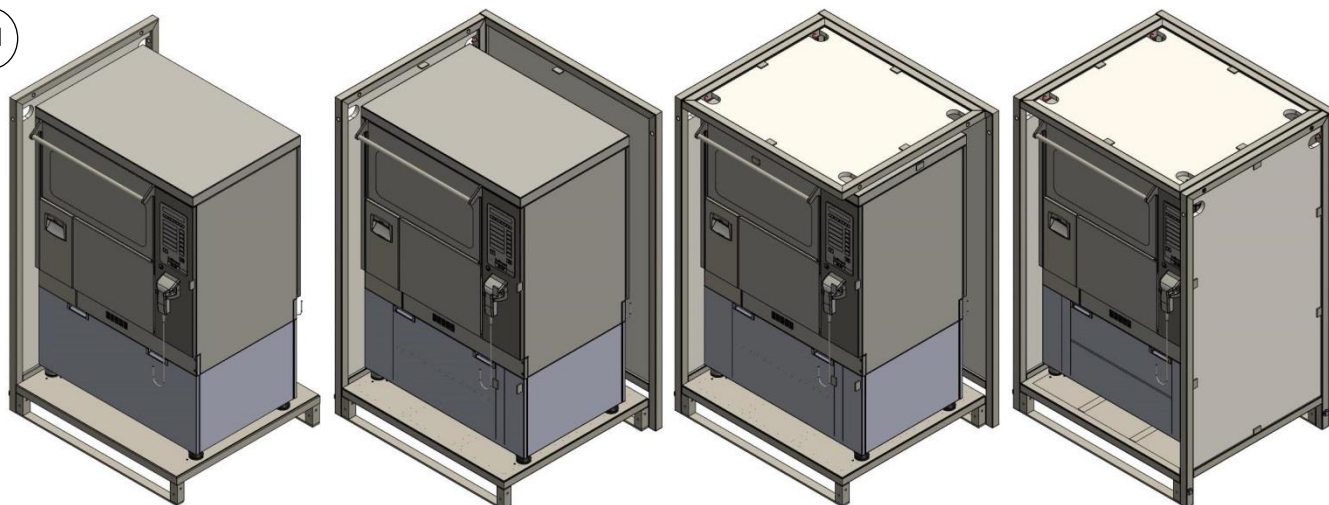

- Befestigen Sie mit den angegebenen Schrauben, Muttern sowie Scheiben (siehe Inhaltsliste REG-E Belimed, Art. Nr. 609884), die Seitenteile (Art. Nr. 610036), Vorderteile (Art. Nr. 610039) und den Deckel (Art. Nr. 610037) in der abgebildeten Reihenfolge.