

Prozesswasserkühler mit Aktivkohlefilter



Packanleitung
Art Nr. 610029

Wassermanagement

Copyright

© 2021 HP Medizintechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten

Änderungen von Spezifikationen, Bedingungen und Preisen vorbehalten.
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung
ihres Inhalts sind auch auszugsweise nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich
zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz.


Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen
vorbehalten.

Hersteller, Lieferant und Werkskundendienst


HP Medizintechnik GmbH
Bruckmannring 34
D-85764 Oberschleißheim

Tel.: +49 (89) 45 35 19 4 -50
Fax: +49 (89) 45 35 19 4 -90
Internet: <http://www.hp-med.com>
Email: info@hp-med.com


Weitere Kontaktadressen finden Sie unter www.hp-med.com

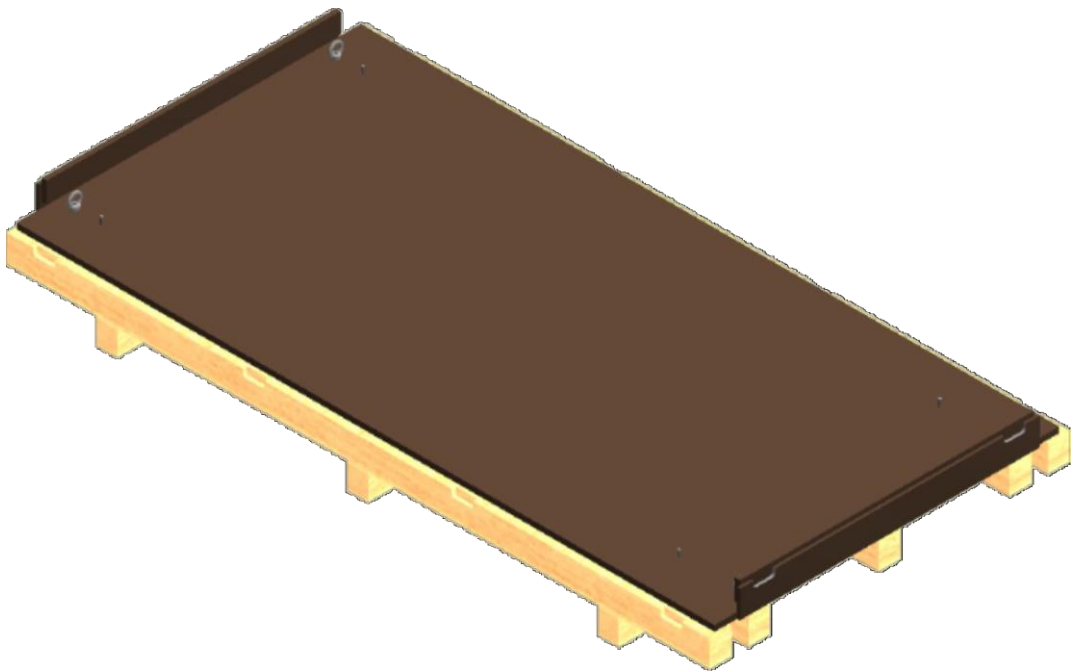


Den Kistenboden zur Beladung hinstellen.

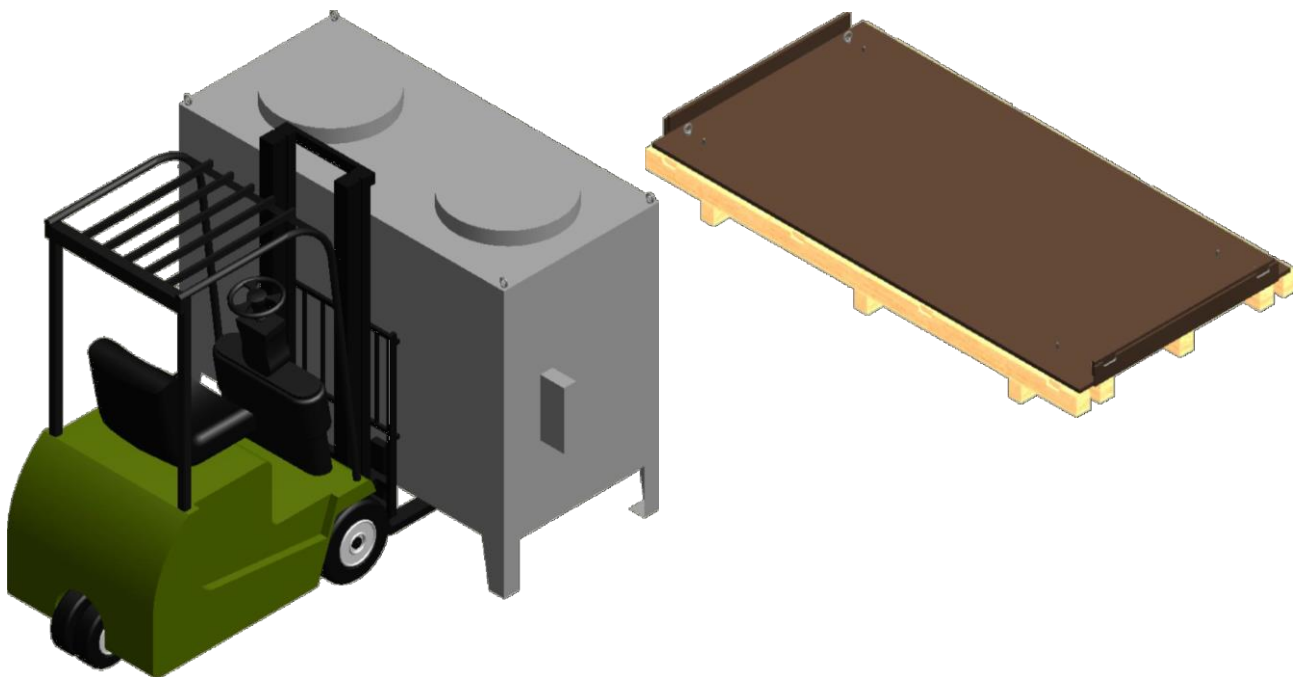



Den Prozesswasserkühler vorsichtig mit einem Gabelstapler oder mit einem Kran auf den Kistenboden stellen.

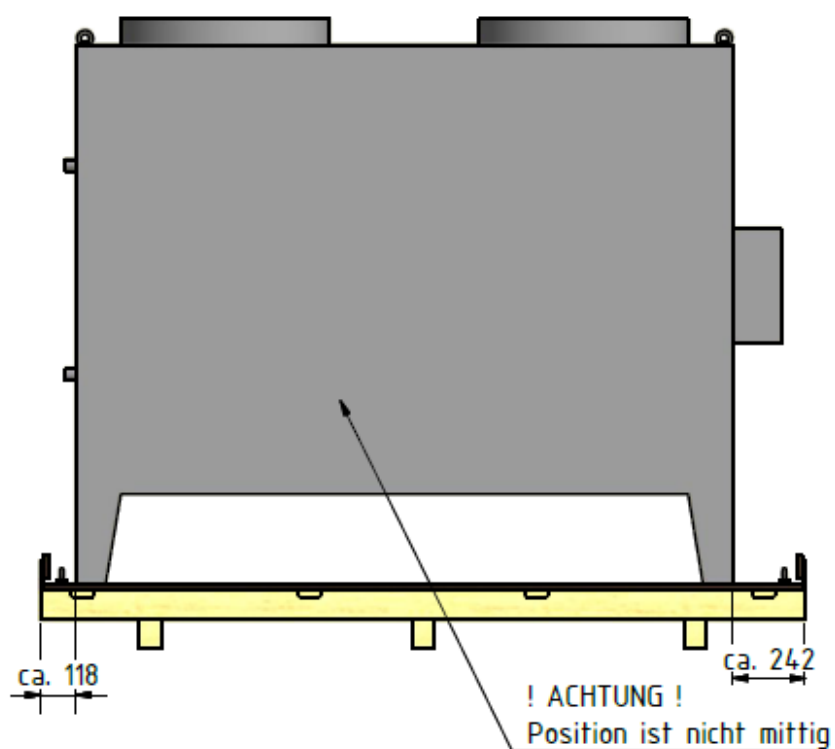

Auf Grund der seitlichen Einbauteile kann das Gerät nicht mittig in der Kiste positioniert werden. Achten Sie auf die Position der sich am Boden befindlichen Bolzen.

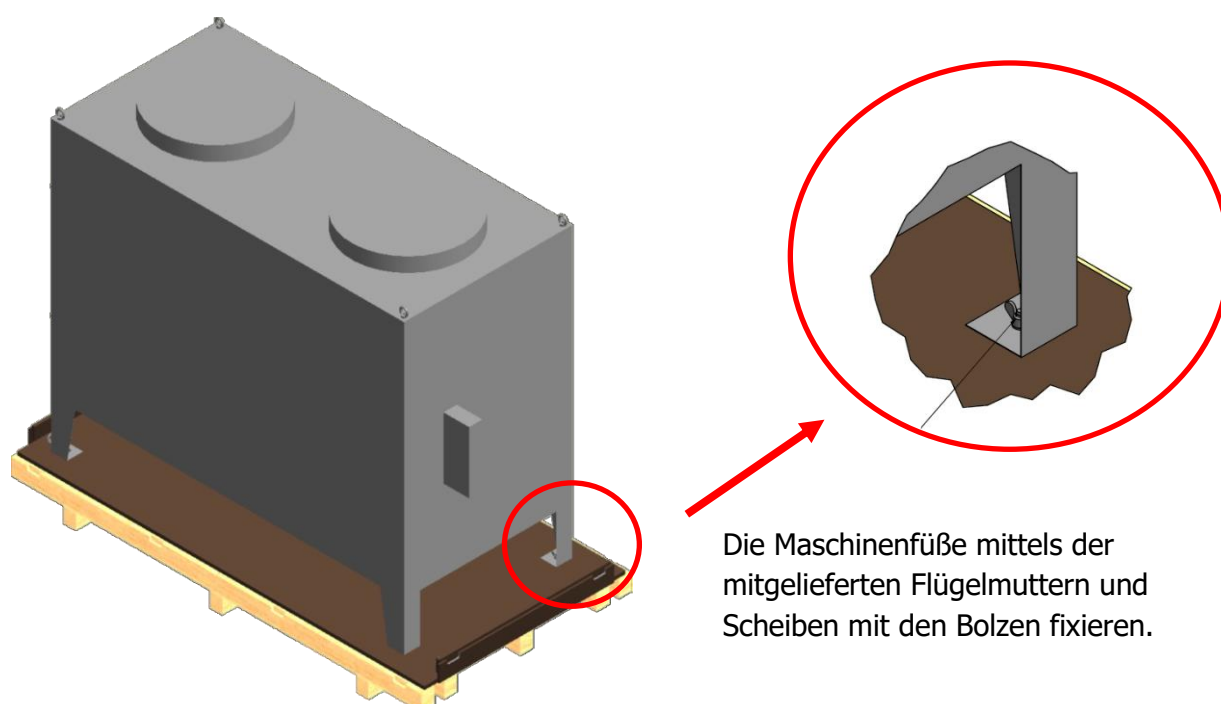

Das Gerät mit den 4
mitgesendeten Gurten durch die
am Boden befestigten Ringösen je
Seite zweimal kreuzweise
verzurren.

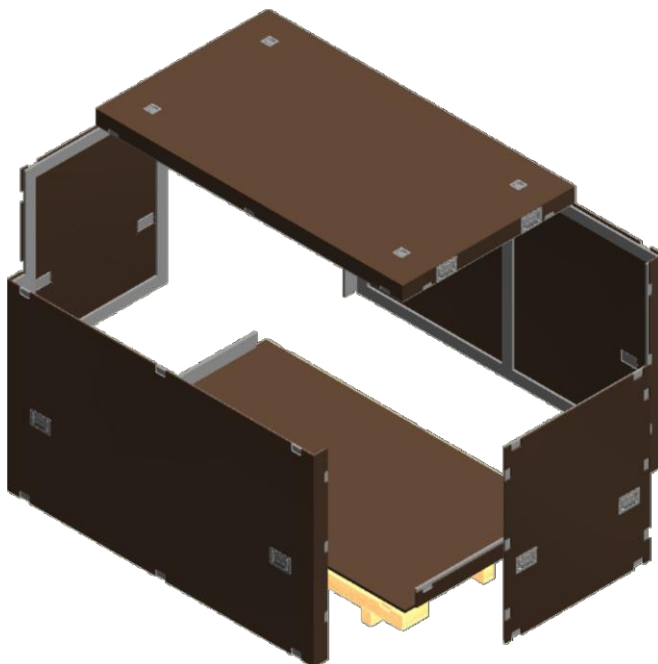
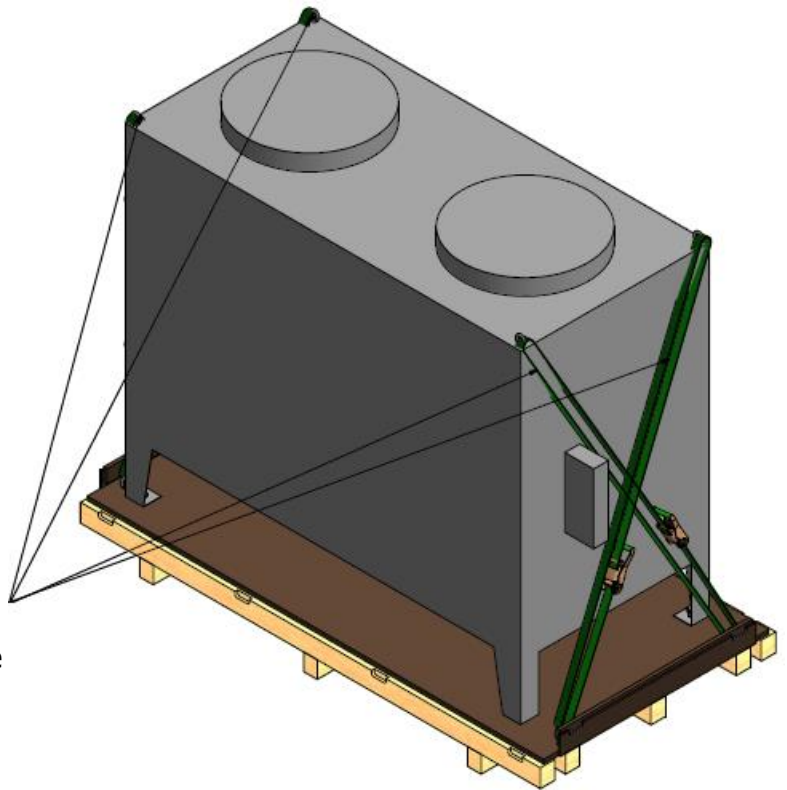


AUF/ZU:
kappbaren Flügel aufklappen
und um 180 Grad drehen



Gefahr!

Die Ösen am Deckel dürfen **nur** für das Öffnen des Deckels verwendet werden!
Die komplette Verpackung mit oder ohne Gerät **DARF NICHT** an diesen Ösen gekrant werden.

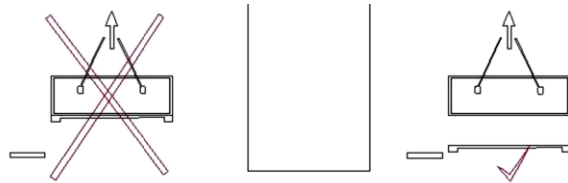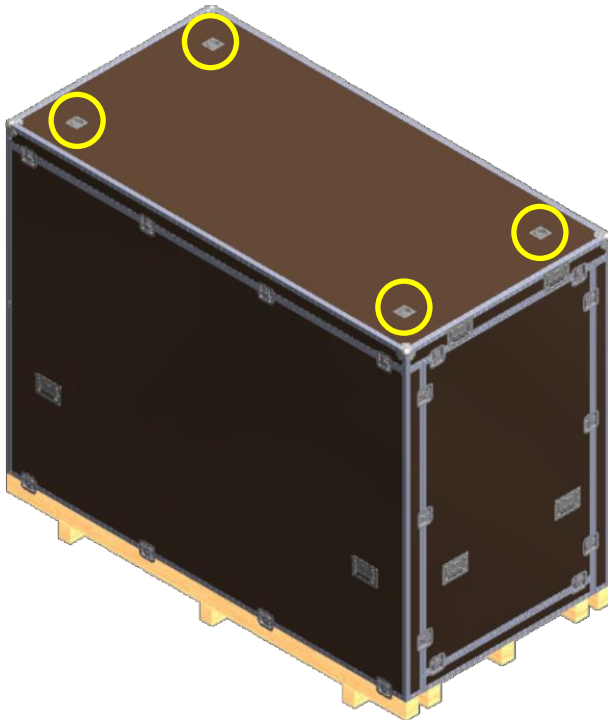

Only for opening the lid!
Nur für das Öffnen des Deckels!

Open all latches and locks
before lifting the lid!
Öffnen Sie alle Verriegelungen
bevor Sie den Deckel anheben!



Mithilfe der Griffe und der am Deckel befindlichen Ösen können alle Kistenteile positioniert werden und durch die Betätigung der Butterflyverschlüsse verschlossen werden.



Zur Vereinfachung der Montage sind alle Kistenteile nummeriert.

HP Medizintechnik GmbH

Bruckmannring 34
85764 Oberschleißheim

Tel.:	Tel.:	+49 (89) 45 35 19 4 -50
Fax:	Fax:	+49 (89) 45 35 19 4 -90
Internet:	Internet:	http://www.hp-med.com
Email:	Email:	info@hp-med.com